



BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

Fabricante: EVOLVE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.139.055/0001-73

Nome Técnico: 2501866 – Brocas Cirúrgicas

Classe de Risco: II

Regra de Classificação: 6

O responsável legal e técnico do estabelecimento assumem a responsabilidade pelas informações apresentadas nesta Instrução de Uso

(11) 4200-1135



sac@evolve.ind.br



www.evolve.ind.br



R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** são dispositivos médicos de furação/desgaste ósseo e devem ser utilizadas em procedimentos onde haja necessidade de cortes e desgastes ósseos convencionais, osteotomias, osteoplastias e perfurações gerais na região Crânio-Maxilo-Facial.

O fundamento de funcionamento das **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** reside na remoção de material causada pelas suas arestas multicortantes por meio de movimentos rotativos realizados através de motores cirúrgicos, assim quando entram em contato com o osso causam o desgaste do mesmo.

Todos os modelos comerciais das **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**, são de uso único e não podem ser reutilizados, assim como é proibido reprocessá-la.

ACESSÓRIOS

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** não possuem acessórios/opcionais.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO OU MECANISMO DE AÇÃO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ser acopladas à uma peça de mão específica, e conectada à um motor cirúrgico, fornecendo ao cirurgião as respectivas modalidades de uso: procedimentos de corte em ossos e tecidos duros. Podendo ser utilizado em diversas especialidades cirúrgicas onde se tem a necessidade de realizar os procedimentos cirúrgicos.

COMPOSIÇÃO

Os modelos que compõe as **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** são confeccionados pelas seguintes matérias-primas: AÇO INOX ASTM F899.

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

INDICAÇÃO / DESEMPENHO PREVISTO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** são instrumentos confeccionados para assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos. Esses instrumentos foram projetados para serem utilizados em motores cirúrgicos, que confirmam total compatibilidade para o uso das **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**.

FINALIDADE DE USO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** podem ser utilizadas em diversas aplicações: osteotomia mandibular anterior, osteotomia mandibular posterior, osteotomia posterior mandibular dentoalveolar, assimetria facial, reconstrução óssea, orbital hipertelorismo, genioplastia, osteotomia Lefort I, Lefort II e Lefort III, correção cantal medial e lateral, disostese mandibulofacial, deformidades secundárias a tumores, síndrome Apert ou Crouzon e fissuras faciais.

APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTAL

O registro de notificação, **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** é composto pelos modelos indicados no Anexo I.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ser transportadas e manuseadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características. O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção ao instrumental desde a expedição até a entrega ao cliente.

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ser armazenadas e transportadas a temperatura de 18-25°C e umidade abaixo de 70%, em local limpo, seco, arejado e ao abrigo da luz. As condições especiais de armazenamento, manipulação e conservação do produto devem ser seguidas no intuito de assegurar que os componentes permaneçam intactos para o procedimento cirúrgico. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte, limpeza e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as boas práticas de armazenamento e distribuição de produtos médicos.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ser manipuladas cuidadosamente e individualmente, evitando-se batidas ou quedas. Qualquer produto que tenha caído ou sido inadequadamente manuseado, ou com suspeita de ter sofrido dano, deve ser separado e segregado.

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ser manipuladas observando os seguintes cuidados:

- Manipular em temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar;
- Evitar radiação solar direta; e
- Antes de utilizar o produto verifique todas as informações da Instrução de Uso e Rotulagem.

Após a substituição, os componentes danificados devem ser destruídos, a fim de evitar-se, de forma indevida, o uso posterior. O descarte do instrumental deverá obedecer às normas relativas à eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante. Recomendamos que as peças sejam cortadas, entortadas ou limadas para sua inutilização. Para descartar o instrumental seguir os

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

procedimentos legais locais do país para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

VERIFICAÇÃO DA EMBALAGEM

O produto é fornecido embalado na forma estéril.

Antes da abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- **Integridade da embalagem:** Caso a mesma esteja violada ou danificada, o produto não pode ser utilizado; e
- **Prazo de validade:** Não utilizar o produto se o prazo de validade estiver vencido.

Após abertura da embalagem os seguintes aspectos devem ser verificados:

- **Integridade do produto:** o produto deve estar íntegro, com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas ou qualquer sinal de dano. Utilizar somente produtos que estejam nessas condições;
- Nunca utilizar os produtos danificados; e
- O conteúdo de embalagens abertas que não foram utilizadas deve ser descartado, não reesterilizar. Não são aceitas devoluções se a caixa estiver aberta.

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO ACABADO

Embalagem primária: Envelope papel grau cirúrgico (PET+PP)

Embalagem secundária: Envelope papel grau cirúrgico (PET+PP).

Embalagem terciária: Papel couche.

Etiqueta de rastreabilidade

Rotulagem Externa

Broca Cirúrgica Evolve



(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br










R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



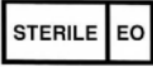

BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

SIMBOLOGIA DO PRODUTO

SÍMBOLO	IDENTIFICAÇÃO
	Prazo de validade
	Data de fabricação
	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Não reusar
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Mantenha em local seco
	Proteger de luz solar
	Consultar as instruções de uso
	Cuidado

Fonte: ABNT NBR ISO 15223-1:2022 - Dispositivos médicos - Símbolos a serem usados em informações fornecidas pelo fabricante.

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** contêm itens de identificação e rastreabilidade marcados em sua estrutura. Também são fornecidos como forma de identificação e rastreabilidade um rótulo de identificação e três vias da etiqueta de rastreabilidade, com as informações necessárias para a identificação do produto. O rótulo apresenta a seguinte informação: Instrução de Uso disponível em <http://www.evolve.ind.br> Reg. ANVISA: 81838380002. Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (11) 4200-1135 ou pelo e-mail sac@evolve.ind.br. Estas informações estão em conformidade com os artigos 50, 51, 52, 53 e 54 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 751, de 15 de setembro de 2022, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de dispositivos para saúde.

PRAZO DE VALIDADE

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** têm validade de 02 anos.

ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Produto de uso único, não reutilizar;
- As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** são produtos recomendados para uso único, e tem seu reprocessamento proibido.

PRECAUÇÕES

- Nunca tente retrabalhar uma broca, isso afetará a função específica de seu uso, alterando suas dimensões gerais. Qualquer retrabalho poderá causar desgaste excessivo, descaracterizando sua função, trazendo grandes prejuízos ao uso pretendido e ao paciente;
- O uso contínuo ou prolongado de uma broca poderá causar desgaste nas

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

- mesmas e acarretar em possíveis rupturas. Uma broca desgastada, fatalmente deixará o procedimento cirúrgico mais prolongado, podendo ainda causar necrose térmica devido ao aquecimento por fricção;
- Para bons resultados cirúrgicos e para evitar qualquer perda do fio de corte, necrose térmica devido ao aquecimento por fricção, arqueamento e risco de ruptura, utilize sempre brocas novas a cada procedimento cirúrgico;
 - O uso de irrigação durante a operação com brocas reduzirá a possibilidade à necrose térmica;
 - Assegure-se que a broca esteja devidamente encaixada e travada na peça de mão antes de acionar o motor cirúrgico;
 - Não tente inserir ou remover as brocas enquanto a peça de mão estiver em funcionamento. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para a equipe da sala de cirurgia;
 - Não aplique pressão excessiva como, por exemplo, flexionar ou arquear as brocas. A pressão excessiva pode dobrar ou fraturar os instrumentos, causando danos ao tecido e/ou perda do controle tátil. O não atendimento desta instrução pode resultar em lesão para o paciente e/ou para a equipe da sala de cirurgia;
 - Artigo médico hospitalar – recomendado uso único – recomendado descartar após uso;
 - Fabricante recomenda uso único;
 - Produto estéril. Esterilizado por óxido de etileno (ETO). Atentar para o fato de a esterilidade ser assegurada somente enquanto a embalagem não for aberta, danificada ou molhada;

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

- As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** devem ter seu uso exclusivo somente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente treinados e orientados para utilizarem de maneira adequada o produto;
- O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com devidos cuidados da área médico-hospitalar. Se a embalagem estiver danificada, o produto deverá ser assumido como não esterilizado.

CONTRAINDICAÇÕES

Este produto não pode ser utilizado em procedimentos no sistema nervoso central ou sistema circulatório central.

ESTERILIZAÇÃO

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** são submetidas à esterilização por Óxido de Etileno (ETO).

EFEITOS ADVERSOS

Não são esperados efeitos adversos com o uso das **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**.

MODO DE USO E COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS

As **BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE** foram projetadas para serem utilizadas em conjunto com motores cirúrgicos, assim para a utilização das brocas é necessário conectar a mesma a uma peça de mão, em seguida, certificando-se que a mesma esteja bem fixada, o usuário deverá conectar a peça de mão ao motor cirúrgico, selecionar a potência do motor de acordo com a necessidade exigida pelo procedimento e assim executar a operação.

RECLAMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Evolve.

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

Quaisquer eventos adversos devem ser notificados ao fabricante através do e-mail sac@evolve.ind.br e à equipe de Tecnovigilância do órgão sanitário competente (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA), através do formulário eletrônico NOTIVISA (<https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/tecnovigilancia>), com a descrição do evento e dos dados de rastreabilidade que permitam a análise da causa do evento.

O e-mail deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico (minimamente: descrição do produto, número do lote e o número de registro Anvisa), bem como as condições atuais dos produtos.

Todas as ocorrências notificadas ao fabricante e à ANVISA são recebidas pelo Departamento de Tecnovigilância da Evolve e submetidas à avaliação do Comitê Técnico para investigação;

Ao término da investigação, uma carta resposta é elaborada pelo Departamento de Tecnovigilância para informar ao cliente se a reclamação é procedente ou não, e no caso de procedência da reclamação, a carta informa quais providências serão tomadas.

ORIENTAÇÕES AO CONSUMIDOR E PACIENTE

⚠️ ATENÇÃO: Visando a praticidade e a facilidade de acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a EVOLVE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, em conformidade com os artigos 50, 51, 52, 53 e 54 da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022, as Instruções de Uso estão disponíveis no site: <http://www.evolve.ind.br> - Reg. ANVISA: 81838380002, Rev.02 – Data: 11/2023.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (11) 4200-1135 ou pelo e-mail sac@evolve.ind.br.

As instruções de uso estão em pdf – para a leitura é necessário obter Adobe Reader ou programa similar e um navegador: Chrome, Internet Explorer ou correspondente.

INFORMAÇÕES DA ROTULAGEM

REF.: XXXXX (Código do produto embalado)

Lote.: XXXXXXXX (número do lote do produto acabado)

QTD: 1 (Quantidade produto embalagem)

Modelo Comercial: XXXXXXXXX (Nome do modelo comercial do produto acabado)

Nome Técnico: BROCAS CIRÚRGICAS

Material: AÇO INOXIDÁVEL ASTM F899

Registro ANVISA nº: 81838380002

Revisão: XX


Data: AAAA/MM/DD

: AAAA/MM/DD

: AAAA/MM/DD



PRODUTO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

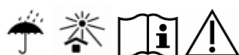

FABRICANTE LEGAL E DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

- EVOLVE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
- Rua Major Carlos Del Prete, nº 1901 complemento, nº 1905 – Santo Antônio, São Caetano do Sul/SP
- CEP:09530-001 - Tel: (11) 4200-1135
- CNPJ: 32.139.055/0001-73 – Indústria brasileira

Responsável Técnico: Alexandre Yasuhiro Miura - CREA/SP: 5070261081

Atendimento ao Consumidor: (11) 4200-1135 – www.evolve.ind.br – sac@evolve.ind.br

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





Instruções de Uso

Rev. 02 11/2023

BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

ANEXO I – TABELA COMPARATIVA DOS MODELOS

(11) 4200-1135



sac@evolve.ind.br





www.evolve.ind.br



R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

TABELA COMPARATIVA DE MODELOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNÇÃO / INDICAÇÃO DE USO	COMPOSIÇÃO (MATÉRIA-PRIMA)	DIMENSÕES	IMAGENS ILUSTRATIVAS
B1000	BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	----	
COMPONENTES					
B069	BROCA 0.8MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø0,8 x 50MM	

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

B169	BROCA 0.8MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø0,8 x 70MM	
B070	BROCA 1.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,0 x 50MM	
B170	BROCA 1.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,0 x 70MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

B071	BROCA 1.2MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,2 x 50MM	
B171	BROCA 1.2MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,2 x 70MM	
B072	BROCA 1.6MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,6 x 50MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

B172	BROCA 1.6MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,6 x 70MM	
B073	BROCA 2.1MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,1 x 50MM	
B173	BROCA 2.1MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,1 x 70MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BL016	BROCA LINDEMANN CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,35 x 60MM	
BL116	BROCA LINDEMANN LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,35 x 66,5MM	
BP040	BROCA PERA 4.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø4,0 x 50MM	

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BP140	BROCA PERA 4.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø4,0 x 70MM	
BP050	BROCA PERA 5.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø5,0 x 50MM	
BP150	BROCA PERA 5.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø5,0 x 70MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BR010	BROCA BOLA 1.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,0 x 50MM	
BR110	BROCA BOLA 1.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,0 x 70MM	
BR015	BROCA BOLA 1.5MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,5 x 50MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BR115	BROCA BOLA 1.5MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø1,5 x 70MM	
BR020	BROCA BOLA 2.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,0 x 50MM	
BR120	BROCA BOLA 2.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø2,0 x 70MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BR030	BROCA BOLA 3.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø3,0 x 50MM	
BR130	BROCA BOLA 3.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø3,0 x 70MM	
BR040	BROCA BOLA 4.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø4,0 x 50MM	

(11) 4200-1135




sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001



**BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE**

BR140	BROCA BOLA 4.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø4,0 x 70MM	
BR050	BROCA BOLA 5.0MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø5,0 x 50MM	
BR150	BROCA BOLA 5.0MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø5,0 x 70MM	

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br



www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001





BROCAS CIRÚRGICAS EVOLVE

BR065	BROCA BOLA 6.5MM CURTA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø6,5 x 50MM	
BR165	BROCA BOLA 6.5MM LONGA	Assessorar os cirurgiões em diversas especialidades cirúrgicas, onde é preciso perfurar, descascar, polir ossos e outros tecidos.	AÇO INOX ASTM F899	Ø6,5 x 70MM	

(11) 4200-1135

sac@evolve.ind.br

www.evolve.ind.br

R: Major Carlos Del Prete nº 1901, Cerâmica, São Caetano do Sul – SP CEP: 09.530-001

